

方法一：高温湿热消毒

制造商：北京谊安健康科技有限公司		消毒水平：高水平	
持续正压通气用 口鼻罩/鼻罩	产品型号：AF-01、AF-02、AF-03、AN-01、AN-02、AN-03、AP-01、AH-01、AH-02		
警告	1. 本公司不对任何与本指南不符的操作(如：超循环次数使用)，以及这些操作所带来的产品性能变化进行保证。 2. 请勿使用高压灭菌法或氧化乙烯气体灭菌法对面罩进行消毒。 3. 当使用清洁剂、消毒剂或杀菌剂时，务必遵循制造商的消毒指南与使用说明书。 4. 不得熨烫头带与布套，并且头带与布套的消毒温度应≤75℃，因为头带与布套的材料对温度敏感，容易导致损坏。 5. 根据WS/T 367医疗机构消毒技术规范，面罩属于中度危险性器械，消毒效果需要达到中等水平以上。		
消毒次数限制	允许按照本指南消毒20次。		
消毒流程			
1. 使用前	请用一次性医用清洁布（纸）先清理掉可见脏污。		
2. 净化准备	无特殊要求。		
3. 清洁准备	参照使用说明书对面罩进行拆卸（请勿拆卸“不可拆卸”部分）。		
4. 清洁(自动)	不适用。		
5. 清洁(手动)	a. 将面罩在稀释成浓度为1%的Alconox中性清洁剂溶液（水温度30±5℃）中浸泡10分钟，用软毛刷清洁面罩的各个部件一分钟, 尤其注意缝隙和孔洞。 b. 用清水(饮用水)浸泡面罩零部件两次，然后冲洗两次直至干净（5公升/面罩/次）。 c. 将面罩各零部件置于阴凉处晾干。		
6. 消毒	a. 将面罩各零部件浸泡在热水中进行消毒，消毒的温度与时间如下：		
	温度	时间	注意事项
	93℃	≥10min	不适用于头带、布套与面罩小软管
	90℃	≥12min	
	75℃	≥160min	适用于头带、布套与面罩小软管
	注： 1. 以上温度与时间的选择符合WS_310.2与YY/T0734.1（ISO 15883-1）消毒温度与时间符合以上表格要求的面罩，消毒过程完成可直接使用。 2. 面罩头带、布套与小软管消毒温度≤75℃，否则会造成管子变硬，也会造成头带与布套损坏。 3. 消毒完成后，从热水浴中取出面罩各零部件。		
7. 干燥	将面罩各零部件置于阴凉处晾干。		
8. 维护	不适用。		
9. 检测 与性能测试	1. 对面罩各零部件进行视觉检查。 2. 如果面罩各零部件出现明显变形、破损或开裂情况，请予以丢弃并更换新的零部件或面罩，可以接受硅胶件的轻微变色。		
10. 重新组装	参照使用说明书重新组装面罩。		
11. 包装	用医用一次性塑料袋包装面罩。		
12. 灭菌	不适用。		
13. 贮存	a. 贮存于干燥、无尘且阴凉的环境中。 b. 贮存温度：-20℃~60℃。		
附加信息	本指南符合YY/T 0802（ISO 17664）标准规定，描述了我司已验证的关于持续正压通气用口鼻罩/鼻罩的清洁与消毒的流程，为用户首次使用面罩前提供清洁与消毒的指导。家庭用户建议使用“高温湿热消毒”的方式进行首次使用面罩前的消毒，请勿将面罩放入无恒温控制系统的普通加热装置中消毒，以免损坏面罩。单用户在家庭环境二次使用面罩前，请参考说明书“清洗”章节进行使用前处理。		
制造商联系方法	任何疑问，请致电售后服务电话：400-996-8767		

方法二：高水平化学消毒

制造商：北京谊安健康科技有限公司	消毒水平：高水平
持续正压通气用口鼻罩/鼻罩	产品型号：AF-01、AF-02、AF-03、AN-01、AN-02、AN-03、AP-01、AH-01、AH-02
警告	1. 本公司不对任何与本指南不符的操作(如：超循环次数使用)，以及这些操作所带来的产品性能变化进行保证。 2. 请勿使用高压灭菌法或氧化乙烯气体灭菌法对面罩进行消毒。 3. 当使用清洁剂、消毒剂或杀菌剂时，务必遵循制造商的消毒指南与使用说明书。 4. 清洁与消毒前请取下头带与布套，不能对头带与布套进行高水平化学消毒，请参考消毒指南的“方法一：高温湿热消毒”对头带与布套进行消毒。 5. 根据WS/T 367医疗机构消毒技术规范，面罩属于中度危险性器械，消毒效果需要达到中等水平以上。
消毒次数限制	允许按照本指南消毒20次。
消毒流程	
1. 使用前	请用一次性医用清洁布（纸）先清理掉可见脏污。
2. 净化准备	无特殊要求。
3. 清洁准备	参照使用说明书对面罩进行拆卸（请勿拆卸“不可拆卸”部分）。
4. 清洁(自动)	不适用。
5. 清洁(手动)	a. 将面罩在稀释成浓度为1%的Alconox中性清洁剂溶液（水温：30±5℃）中浸泡10分钟，用软毛刷清洁面罩的各个部件一分钟，尤其注意缝隙和孔洞。 b. 用清水(饮用水)浸泡面罩零部件两次，然后冲洗两次直至干净（5公升/面罩/次）。 c. 将面罩各零部件置于阴凉处晾干。
6. 消毒	1. 将面罩的部件放入浓度为0.55%邻苯二甲醛(如CIDEX® OPA)中浸泡20分钟（水温：30±5℃）。 2. 用清水(饮用水)浸泡面罩零部件两次，然后用清水(饮用水)将面罩零部件重复清洗两次(5公升/面罩/次)。
7. 干燥	将面罩各零部件置于阴凉处晾干。
8. 维护	不适用。
9. 检测与性能测试	1. 对面罩各零部件进行视觉检查。 2. 如果面罩各零部件出现明显变形、破损或开裂情况，请予以丢弃并更换新的零部件或面罩，可以接受硅胶件的轻微变色。
10. 重新组装	参照使用说明书重新组装机罩。
11. 包装	用医用一次性塑料袋包装面罩。
12. 灭菌	不适用。
13. 贮存	a. 贮存于干燥、无尘且阴凉的环境中。 b. 贮存温度：-20℃～60℃。
附加信息	本指南符合YY/T 0802（ISO 17664）标准规定，描述了我司已验证的关于持续正压通气用口鼻罩/鼻罩的清洁与消毒的流程，为用户首次使用面罩前提供清洁与消毒的指导。家庭用户建议使用“高温湿热消毒”的方式进行首次使用面罩前的消毒，请勿将面罩放入无恒温控制系统的普通加热装置中消毒，以免损坏面罩。单用户在家庭环境二次使用面罩前，请参考说明书“清洗”章节进行使用前处理。
制造商联系方式	任何疑问，请致电售后服务电话：400-996-8767